

KAdermín

mousse spray

SCX TECHNOLOGY

MOUSSE SPRAY

*coadiuvante per la protezione
di lesioni cutanee ed abrasioni*

125 ml

Il dispositivo medico **KADERMIN MOUSSE SPRAY** è una crema, erogata in forma di mousse, che crea una barriera protettiva non convenzionale (bende e cerotti) delle lesioni cutanee coadiuvante il trattamento delle piccole ferite, delle lesioni da decubito, delle irritazioni e degli arrossamenti da pannolini negli anziani, etc.. Il DM ha lo scopo di isolare e proteggere la cute da fattori irritanti esterni e favorire il ripristino dell'equilibrio fisiologico della cute. La funzione barriera è esplicata dall'acido ialuronico, che grazie alla sua struttura polimerica crea un film idratante e protettivo sulla lesione. All'interno del film che esso crea, viene inglobato il complesso SCX-Powder costituito da biossido di silicio funzionalizzato con Ioni Argento e Clorexidina. Grazie alle sue proprietà antimicrobiche il complesso SCX-Powder garantisce una barriera resistente agli attacchi da parte degli agenti microbiici esterni, proteggendo la lesione e favorendo i fisiologici processi di riparazione tissutale.

ISTRUZIONI PER L'USO

Prima dell'utilizzo pulire la cute ed asciugarla accuratamente. Agitare bene il flacone prima dell'erogazione. Applicare un sottile strato di mousse nella zona interessata, erogando da una distanza di circa 5 cm. Massaggiare con pressione leggera e uniforme. Applicare la medicazione una volta/due volte al giorno.

AVVERTENZE

Per uso esterno, non ingerire, Evitare il contatto con gli occhi, in caso di contatto lavare immediatamente con acqua. Non utilizzare se la confezione risultasse danneggiata. Non sterilizzare. Richiudere accuratamente la confezione dopo l'uso. Non utilizzare dopo la data di scadenza. Sospendere il trattamento in presenza di anormale reazioni cutanee. L'applicazione, non necessita di personale medico.

CONTROINDICAZIONI

Non sono attualmente noti fenomeni di sovradosaggio o interazioni con farmaci e sostanze medicinali, l'ipersensibilità accertata verso i componenti, Non utilizzare al di sotto dei 3 anni.

COMPOSIZIONE

Aqua, Glycerine, Allantoin, Panthenol, SCX-Powder (complesso di ossido di silicio funzionalizzato con Ioni Argento e Clorexidina), Sodium Jaluronate, Dicaprylyl Ether, Glyceryl Stearate, Ceteareth-20, Ceteareth-12, Cetearyl Alcohol, Cetyl Palmitate, Limnanthes Alba, Sweet Almond Oil, Octyl Palmitate, Lauryl Olivat, Cocamidopropyl Betaine, Oat Beta Glucan. Propellente GPL: miscela butano-propano.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Contenitore sotto pressione. Non esporre a temperature inferiori a 5°C e superiori 50°C. Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso. Utilizzare solo per gli scopi indicati. Non indirizzare verso gli occhi. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Usare e conservare lontano da fiamme libere, dispositivi di illuminazione, scintille, fonti di calore o apparecchiature elettriche in movimento. In caso di ingestione o erogazione negli occhi, consultare immediatamente un servizio di assistenza medica o centro antiveleni e fornire le informazioni sul prodotto riportate in etichetta



ESTREMAMENTE
INFAMMABILE

LOT

vedere
parte
inferiore

1753 e

USO ESTERNO

contenuto netto: 125 ml
Rev. 4 del 16/11/2016



PAVIA FARMACEUTICI s.r.l.
Via Vistarino 14
27010 Copiano (PV)

distribuito da: PHARMADAY
PHARMACEUTICAL srl
UNIPERSONALE
Via Vistarino, 14/F - 27010 Copiano (PV)

