


## INFORMAZIONI PER L'USO

Leggere con attenzione!


# Otalgan® Cerunex 10 ml

CE


### Per sciogliere e rimuovere il tappo di cerume

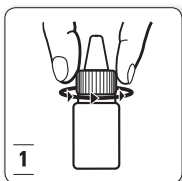


1  
Tenere il flaconcino in posizione verticale e staccare, ruotandola con precauzione, la chiusura originale (= cappuccio superiore).

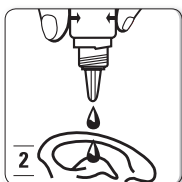


2  
Instillare le gocce direttamente nel condotto uditivo.

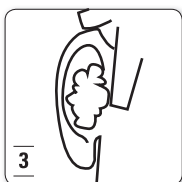

3  
Chiudere l'orecchio con cotone

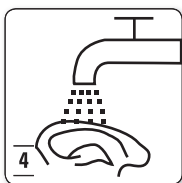

4  
Dopo circa 5–10 minuti, sciacquare accuratamente con acqua tiepida.

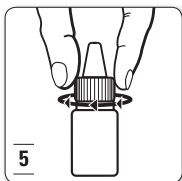

5  
Dopo l'uso, rimettere il cappuccio.

Otalgan® Cerunex 10 ml soluzione auricolare da instillare nel condotto uditivo.

### INDICAZIONI

Per ammorbidire e rimuovere il tappo di cerume nei bambini, negli anziani e per i praticanti di sport acquatici. Per la rimozione del cerume dall'orecchio prima di visite otorinolaringoiatriche e prima di trattamenti farmacologici locali.

### POSOLOGIA (ISTRUZIONI PER L'USO)

Instillare 10–15 gocce nel condotto uditivo, reclinando la testa lateralmente.

Premendo brevemente e delicatamente il flaconcino, liberare una goccia per volta.

Successivamente chiudere l'orecchio con cotone idrofilo in modo che Otalgan® Cerunex possa svolgere la sua azione sul cerume.

Dopo circa 5–10 minuti, sciacquare accuratamente con acqua tiepida.

### DURATA DELL'APPLICAZIONE

In caso di cerume molto indurito è opportuno ripetere l'applicazione. Se il tappo di cerume è di grandi dimensioni, utilizzare il prodotto secondo parere medico.

## INFORMAZIONI PER L'USO

Leggere con attenzione!

# Otalgan® Cerunex 10 ml



110

### EFFETTI INDESIDERATI

In casi molto rari (<1/10.000) si possono osservare irritazioni cutanee locali. Se nota degli effetti secondari che non sono menzionati in questo foglietto illustrativo, è pregato di informarne il suo medico o il suo farmacista.

### AVVERTENZE

Non utilizzare in caso di:

- Perforazione del timpano
- Ipersensibilità a uno dei componenti
- Lesioni/infiammazioni del condotto uditivo

Otalgan® Cerunex non può essere usato insieme ad altri medicinali per il trattamento locale del condotto uditivo.

In caso di dolori nel condotto uditivo, pulirlo con dell'acqua a temperatura corporea e interrompere l'uso di Otalgan® Cerunex.

Evitare il contatto con gli occhi.

Nel caso questo si verifici, sciacquare subito e abbondantemente gli occhi con acqua corrente.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Tenere il flacone ben chiuso e non esporre a fonti di calore o alla luce.

Conservare Otalgan® Cerunex a temperatura ambiente (Non conservare al di sopra di 30°C.)

### AVVERTENZE PER LA CONSERVAZIONE

Dopo l'apertura, il prodotto è conservabile al massimo per 6 mesi.

Non fare uso di Otalgan® Cerunex dopo la data di scadenza riportata sulla confezione.

### USO ESTERNO

### Composizione:

Docusato sodico, glicerolo, etanolo, diidrogenofosfato di sodio, idrossido di sodio, acqua purificata.

### Fabbricante:

Vifor Consumer Health SA, route de Moncor 10, Case postale,  
CH-1752 Villars-sur-Glâne 1, Svizzera

17716.6 – 1703

110