

KAdermín

polvere spray

SCX TECHNOLOGY

POLVERE SPRAY

*coadiuvante per la protezione
di lesioni cutanee ed abrasioni*

125 ml

Il dispositivo medico **KADERMIN POLVERE SPRAY** è un formulato in polvere che crea una barriera protettiva coadiuvante il trattamento di ferite, abrasioni, ustioni minori e in particolar modo lesioni cutanee in presenza di essudato. Il Dispositivo Medico forma una barriera filmogena protettiva, creando così un ambiente protetto dalle aggressioni microbiche e favorendo il ripristino delle normali condizioni fisiologiche utili alla rigenerazione spontanea della cute. La funzione barriera è esplicata dall'associazione del caolino con l'acido ialuronico che hanno ciascuno una specifica azione: il caolino agisce da materiale assorbente nel caso di ferite con essudato, mentre l'acido ialuronico, idratandosi, agisce da polimero filante e favorisce l'idratazione dei tessuti. Il complesso SCX-Powder è costituito da biossido di silicio funzionalizzato con Ioni Argento e Clorexidina; esso è inglobato nella barriera creata dal caolino e dall'acido ialuronico. Grazie alle sue proprietà antimicrobiche garantisce che la barriera formata dal DM sia resistente agli attacchi da parte degli agenti microbici, migliorando così l'effetto della barriera protettiva sulla lesione rendendola efficace contro le aggressioni microbiche esterne.

ISTRUZIONI PER L'USO

Prima dell'utilizzo pulire la cute ed asciugarla accuratamente. Agitare bene il flacone prima dell'erogazione. Applicare un sottile strato di polvere solo nella zona interessata, erogando da una distanza di circa 10 cm. Non massaggiare: la polvere deve formare uno strato continuo protettivo. Applicare la medicazione una volta al giorno.

AVVERTENZE

Per uso esterno, non ingerire. Evitare il contatto con gli occhi, in caso di contatto lavare immediatamente con acqua. Non utilizzare se la confezione risultasse danneggiata. Non sterilizzare. Richiudere accuratamente la confezione dopo l'uso. Non utilizzare dopo la data di scadenza. Sospendere il trattamento in presenza di anomale reazioni cutanee. L'applicazione, non necessita di personale medico.

CONTROINDICAZIONI

Non sono noti fenomeni di sovradosaggio. Ipsensibilità accertata verso i componenti. Non sono note interazioni con farmaci e sostanze medicinali. Non utilizzare per bambini di età inferiore ai 3 anni.

COMPOSIZIONE

SCX-Powder (complesso di ossido di silicio funzionalizzato con Ioni Argento e Clorexidina), Caolino, Silica, Sodium Ialuronate 0,2%. Propellente: miscela butano-propano.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Contenitore sotto pressione. Proteggere dalla luce diretta del sole e non esporre a temperature inferiori a 5°C e superiori 50° C. Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso. Utilizzare solo per gli scopi indicati. Non indirizzare verso gli occhi. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Usare e conservare lontano da fiamme libere, dispositivi di illuminazione, scintille, fonti di calore o apparecchiature elettriche in movimento. Non fumare durante l'utilizzo e non inalare le esalazioni. Usare solo in ambienti ventilati. In caso di ingestione o erogazione negli occhi, consultare immediatamente un servizio di assistenza medica o centro antiveleni e fornire le informazioni sul prodotto riportate in etichetta.



**ESTREMAMENTE
INFIAMMABILE**



1753 e

USO ESTERNO

contenuto netto: 125 ml
Rev. 4 del 16/11/2016



CE 0546

PAVIA FARMACEUTICI s.r.l.
Via Vistarino 14
27010 Copiano (PV)

distribuito da: **PHARMADAY
PHARMACEUTICAL srl**
UNIPERSONALE
Via Vistarino, 14/F - 27010 Copiano (PV)

