

AVVERTENZE

Non utilizzare in caso d'inflammazioni all'orecchio, di dolore, di perforazione del timpano, di drenaggi transtimpanici, in caso di vertigini o se siete stati operati al timpano. In caso di dubbio, consultate il vostro medico.

ATTENZIONE

Recipiente sotto pressione: può scoppiare se riscaldato. Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso. Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50 °C. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Applicazione

Otalgan Spray Auricolare è una soluzione a base di sale marino che rimuove dalle orecchie l'eccesso di cerume, le particelle di polvere e previene la formazione dei tappi, consentendo una corretta igiene e pulizia dell'orecchio. Per uso esterno. Adatto ad adulti e a bambini a partire dai 3 anni.

Ingredienti

Acqua, sale marino, azoto

CE 1250

Fabbricante

Vifor Consumer Health SA
Route de Moncor 10, Case postale
CH-1752 Villars-sur-Glâne 1, Svizzera

LOT

 Vedere fondo del flacone

Otalgan®

Spray auricolare



Spray Auricolare per
una corretta igiene
e pulizia dell'orecchio

3⁸⁵

e 50 ml

Istruzioni per l'uso

Non rimuovere il tappo di sicurezza dallo spruzzatore durante l'uso. Tenere il flacone dritto e premere il tappo per 1 secondo (fig. 1).

Massaggiare delicatamente per 10 secondi la base dell'orecchio (fig. 2).

Inclinare la testa, per consentire al liquido in eccesso di uscire dall'orecchio e pulire (fig. 3).

È sufficiente un'applicazione per ciascun orecchio, 2 o 3 volte alla settimana. Otalgan Spray Auricolare può essere utilizzato tutti i giorni in caso di abbondante produzione di cerume e dai portatori di apparecchio acustico.

Dopo l'uso, pulire sempre lo spruzzatore con acqua calda.

